


Lector de pruebas rápidas

SkaniFlexi® para uso diario en el laboratorio clínico

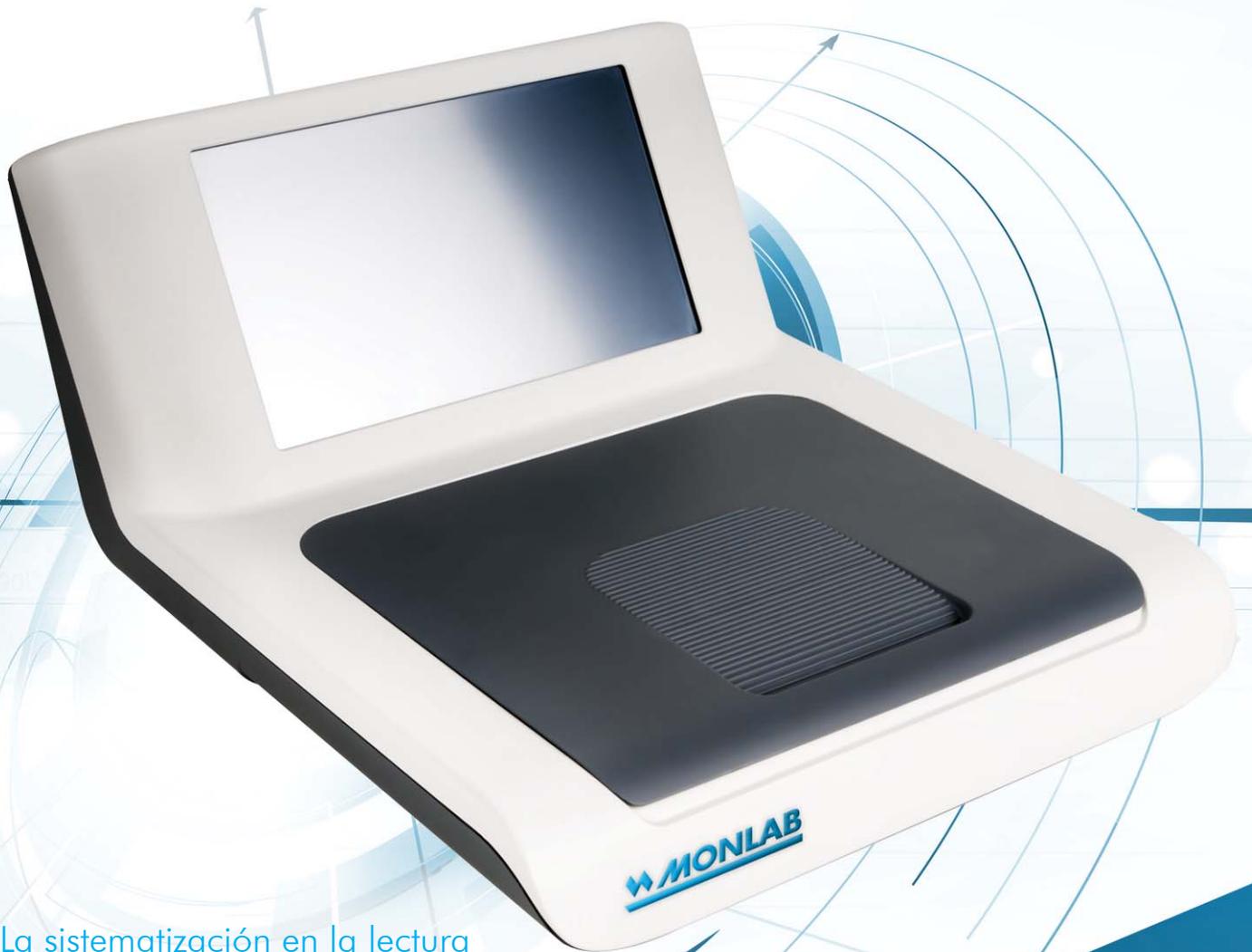

La sistematización en la lectura de sus pruebas rápidas de una forma eficiente y segura a un precio económico.



Lector de pruebas rápidas SkanFlexi®



Conexiones
USB - LAN

LECTURA DE CASSETES INDIVIDUALES Y MULTIPARAMÉTRICOS

Respiratorias

- Adenovirus respiratorio
- RSV
- Influenza A+B

Heces

- C. difficile A/B
- C. difficile GDH
- C. difficile GDH + A/B
- Rota adenovirus
- Giardia
- FOB
- H.pylori

Orina

- Legionella
- S. pneumoniae
- Combo Legio-Pneumo
- Panel 5 multidrogas
- Panel 10 multidrogas
- Panel 12 multidrogas
- hcg
- S. pneumoniae (en tira)

DROGAS INDIVIDUALES
MONLABTEST

Características principales

- SkanFlexi® es un lector para pruebas rápidas en placa.
- Especialmente útil en la lectura de cassetes multiparamétricos, como pueden ser las pruebas multidrogas de 5, 10 o 12 parámetros
- Lectura fácil y rápida. 1 solo click en su pantalla táctil y en 15 segundos tendrá el resultado en pantalla de todos los analitos y una foto escaneada de la placa que podrá guardar junto al resultado del paciente si lo desea.
- Posibilidad de transmitir los resultados al LIS a través de un puerto Ethernet.
- Si no lo tiene conectado a su red, posibilidad de guardar los últimos 10000 resultados en su memoria.
- Pantalla táctil. Software intuitivo. En 5 minutos aprenderá a utilizarla.
- Software actualizable por internet o USB.
- 2 puertos USB para conectar impresora, lector de código de barras, teclado externo o memoria USB.
- Posibilidad de ampliar el panel de pruebas a petición del cliente.

¿Cómo usar SkanFlexi®?



1- Abrir tapa.



2- Seleccionar prueba a analizar.



3- Colocar prueba.




4- Cerrar tapa.



5- Iniciar lectura.



6- Esperar 15 segundos.

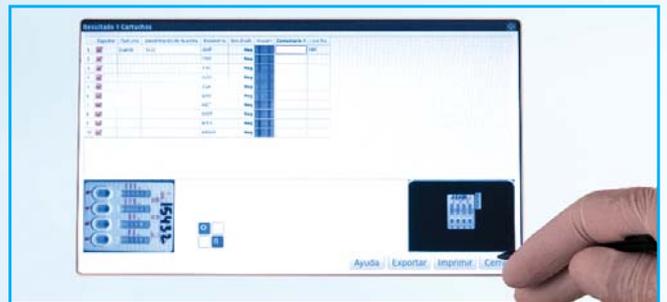

7- Visualizar resultados, identificar muestra, añadir comentarios, enviar on-line...