



MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

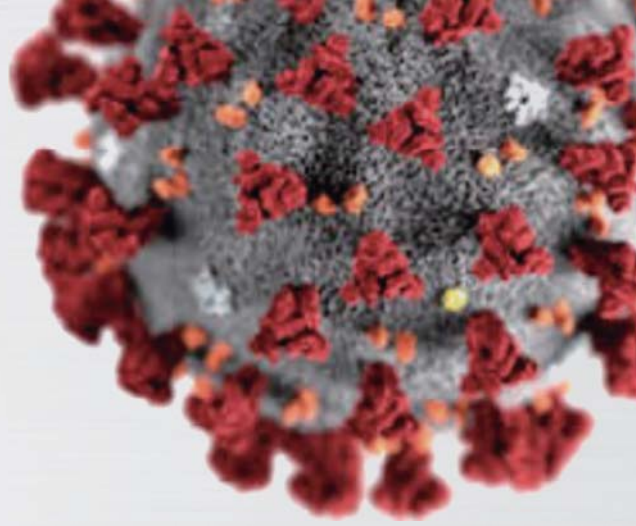

Afias & iChroma II

Soluciones **Monlab** para el
diagnóstico fiable de **COVID-19**

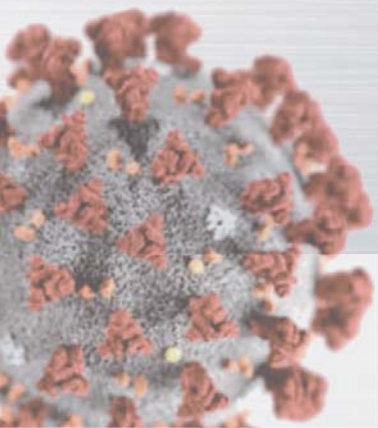

BIO TECHNOLOGY boditech Covid-19 test

Analizadores automatizados de sobremesa por inmunofluorescencia



3 Simples pasos

Paso



Recoja la sangre capilar con la C-tip

Paso




Coloque la C-tip en el cartucho.

Paso



Presione START para ejecutar la prueba

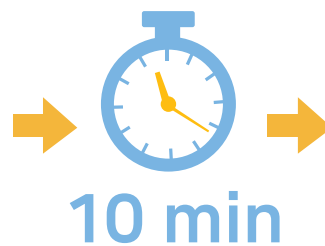

Resultado

AfiAS COVID 19 Ab test resultados

COVID 19 Ab IgM* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**
COVID 19 Ab IgG* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**

*El resultado del test es negativo si COI es <0,9, indeterminado si COI está entre 0,9-1,1 y positivo si COI está entre > 1,1-200

COI = Cut off index

iChroma II

Dispositivo de diagnóstico in vitro semiautomático



iChroma II COVID 19 Ab test resultados

COVID 19 Ab IgM* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**
COVID 19 Ab IgG* COI **Negativo** o indeterminado o **Positivo**

*El resultado del test es negativo si COI es <0.9, indeterminado si COI está entre 0.9-1.1 y positivo si COI está entre > 1.1-200

COI = Cut off index


Suero, plasma,
sangre total
Punción capilar



Sistemas Point of care
de reducido tamaño



AFIAS
Sistema automatizado

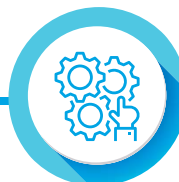

iChroma II
Sistema semiautomatizado

Muy rápidos,
Resultados en 10 min.
Precisos. Fiables



Muy fáciles de usar



Reactivos por
Inmunofluorescencia con
almacenamiento a temperatura
ambiente



POC
Test rápido
Screening

Covid-19 diagnostics product

Nombre Producto	Disponible otoño 2020		Ya disponible	
	AFIAS	iChroma	AFIAS	iChroma
	COVID-19		COVID-19 Ab	
Tipo ensayo	TRFLFA*, Antígeno		TRFLFA*, IgM/IgG	
Muestra	Hisopo nasofaríngeo		Sangre suero plasma	
Preparación muestra	Tubo de extracción		Sangre total sangre capilar (C-tip)	
Diana	Antígeno		Anticuerpos IgM/IgG	
Tiempo	10 minutos			
Sistema	AFIAS-1/6 (Automático)	iChroma II (Manual)	AFIAS-1/6 (Automático)	iChroma II (Manual)
Presentación	24 kit/box	25 kit/box	24 kit/box	25 kit/box

*TRFLFA; Time resolved fluorescence lateral flow immunoassay

Tests disponibles



Infecciosos

i-Chroma	Afias
CRP	CRP
PROCALCITONIN	PROCALCITONIN
ROTA/ADENO	ROTA/ADENO
ROTA	ROTA
NORO	NORO
CALPROTECTIN	
INFLUENZA A+B	
H.PYLORI SA	
COVID 19	COVID 19



Hormonas

i-Chroma	Afias
TSH	TSH
T3	T3
T4	T4
FSH	FSH
hCG y B-hCG	Total B-hCG
LH	LH
PROLACTIN	PROLACTIN
CORTISOL	CORTISOL
TESTOSTERONE	TESTOSTERONE
PROGESTERONE	
	AMH



Cardíaco

i-Chroma	Afias
Tn I	Tn I
Tn I Plus	Tn I Plus
CK-MB	CK-MB
D-DIMER	D-DIMER
NT-proBNP	NT-proBNP
MYOGLOBIN	MYOGLOBIN
hs-CRP	
Tn I/CK-MB/Myo	



Cáncer

i-Chroma	Afias
PSA	PSA
AFP	AFP
CEA	CEA
IFOB	
IFOB/CALPROTECTIN COMBO	



Diabetes

i-Chroma	Afias
HbA1c	HbA1c
MICROALBUMIN	MICROALBUMIN
CYSTATIN C	



Artritis reumatoide

i-Chroma
RF IgM



Otros

i-Chroma	Afias
FERRITIN	FERRITIN
VITAMIN D	